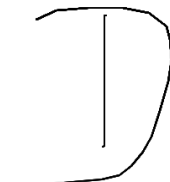


CHECKLIST FEELSAFE PRO ONDERSTEL PB526IIPR-00368	Schoon?	Goed-Gekeurd?
Onderstel: Barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is		
Onderstel: HP fabrikantlabel Controleren of het HP fabrikantlabel reeds is aangebracht! Zo niet, alsnog doen!		
Onderstel:Algemeen Controle op beschadigingen en controleren dat er geen (keurings)stickers van derden aangebracht zijn op het onderstel		
Onderstel:Wielen Controleren op functionaliteit en aanwezigheid schroefjes		
Onderstel:Remmen Controleren op functionaliteit		
Onderstel:Bedverstelling Controle functioneren hoofd- en voeteneindverstelling en hoog/laag verstelling		
Bij PB526I(PR): Borgpen motor voeteneind Controle borgpen ligvlakmotor voeteneind, indien QR-clip aanwezig, deze vervangen door alternatieve borgpen (zie foto)		
Onderstel:kabel HL motor Controleren dat de kabel van de hoog/laag motor minimaal 5cm van de grond hangt		
Onderstel:Bekabeling Controleren dat de bekabeling geen beschadigingen bevat.		
Onderstel:CPR-functie Controleren of deze naar behoren werkt (hoofdeinde omlaag bij inknippen hendel)		
Onderstel: Netsnoer Controleren of het netsnoer is voorzien van trekontlasting en of het is vastgemaakt aan het klittenband aan de tent		
Onderstel:handbediening Controleren of de handbediening netjes is opgehangen aan de daarvoor bestemde ring		
Opbouwframe:schroeven Controleren of alle 12 schroeven goed vast gedraaid zijn		
Opbouwframe:stootrubbers Controleren of deze aanwezig zijn (4x) en goed vast zitten		
Schuim Controleren of alle schuimrollen luchtdicht geseald en zonder gaten/beschadigingen zijn		
Sleutel van de handbediening Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt		
Onderstel:accu Controleren of de accu ook zonder voeding werkt		
Opname bij Human Protection Services Contactpersoon : Diego	Datum : 02-01-2026  Diego	