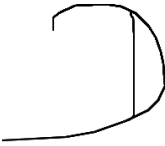


CHECKLIST POSEY ONDERSTEL PB526II-00137	Schoon?	Goed-Gekeurd?
Onderstel: Barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is		
Onderstel: HP fabrikantlabel Controleren of het HP fabrikantlabel reeds is aangebracht! Zo niet, alsnog doen!		
Onderstel:Algemeen Controle op beschadigingen en controleren dat er geen (keurings)stickers van derden aangebracht zijn op het onderstel		
Onderstel:Wielen Controleren op functionaliteit en aanwezigheid schroefjes		
Onderstel:Remmen Controleren op functionaliteit		
Onderstel:Bedverstelling Controle functioneren hoofd- en voeteneindverstelling en hoog/laag verstelling		
Bij PB526II(PR): Borgpen motor voeteneind Controle borgpen ligvlakmotor voeteneind, indien QR-clip aanwezig, deze vervangen door alternatieve borgpen (zie foto)		
Onderstel:kabel HL motor Controleren dat de kabel van de hoog/laag motor minimaal 5cm van de grond hangt		
Onderstel:Bekabeling Controleren dat de bekabeling geen beschadigingen bevat.		
Onderstel:CPR-functie Controleren of deze naar behoren werkt (hoofdeinde omlaag bij inknijpen hendel)		
OpdekmatrasX Controleren op vlekken, bobbelen en vieze geurtjes		
Onderstel: Netsnoer Controleren of het netsnoer is voorzien van trekontlasting en of het is vastgemaakt aan het klittenband aan de tent		
Onderstel:handbediening Controleren of de handbediening netjes is opgehangen aan de daarvoor bestemde ring		
ComfortmatrasX Controleren op vlekken en vieze geurtjes		
Opbouwframe:schroeven Controleren of alle 12 schroeven goed vast gedraaid zijn		
Controle plaatsingtent op onderstelX Controleren juiste plaatsing tent op onderstel: hoofdeind tent aan hoofdeind onderstel. Zie label op tent en sticker op onderstel		
Opbouwframe:stootrubbers Controleren of deze aanwezig zijn (4x) en goed vast zitten		
Gebruiks-aanwijzingenX Controleren op aanwezigheid + versie: -Gebruikershandleiding 3.05 -Beknopte nalooplijst		
Schuim Controleren of alle schuimrollen luchtdicht geseald en zonder gaten/beschadigingen zijn		
Waarschuings-kaartjesX Controleren op aanwezigheid + leesbaarheid van 4 waarschuingskaartjes. Indien niet aanwezig en/of leesbaar deze plaatsen.		

CHECKLIST JAARLIJKSE KEURING POSEY ONDERSTEL PB526II-00137		Schoon?	Goed-Gekeurd?
TentlabelsX Controleren op aanwezigheid + leesbaarheid van tentlabels. Indien niet aanwezig en/of leesbaar tent naar atelier Human Protection.			
Sleutel van de handbediening Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt			
Onderstel:accu Controleren of de accu ook zonder voeding werkt			
Opname bij Human Protection Services Contactpersoon : Diego	Datum : 05-01-2026  Diego		