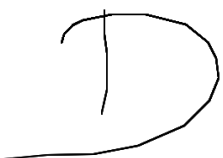


CHECKLIST FEELSAFE PRO ONDERSTEL PB526IIPR-00740	Schoon?	Goed-Gekeurd?
<b>Onderstel: Barcode</b> Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is		
<b>Onderstel: HP fabrikantlabel</b> Controleren of het HP fabrikantlabel reeds is aangebracht! Zo niet, alsnog doen!		
<b>Onderstel:Algemeen</b> Controle op beschadigingen en controleren dat er geen (keurings)stickers van derden aangebracht zijn op het onderstel		
<b>Onderstel:Wielen</b> Controleren op functionaliteit en aanwezigheid schroefjes		
<b>Onderstel:Remmen</b> Controleren op functionaliteit		
<b>Onderstel:Bedverstelling</b> Controle functioneren hoofd- en voeteneindverstelling en hoog/laag verstelling		
<b>Bij PB526II(PR): Borgpen motor voeteneind</b> Controle borgpen ligvlakmotor voeteneind, indien QR-clip aanwezig, deze vervangen door alternatieve borgpen (zie foto)		
<b>Onderstel:kabel HL motor</b> Controleren dat de kabel van de hoog/laag motor minimaal 5cm van de grond hangt		
<b>Onderstel:Bekabeling</b> Controleren dat de bekabeling geen beschadigingen bevat.		
<b>Onderstel:CPR-functie</b> Controleren of deze naar behoren werkt (hoofdeinde omlaag bij inknippen hendel)		
<b>Onderstel: Netsnoer</b> Controleren of het netsnoer is voorzien van trekontlasting en of het is vastgemaakt aan het klittenband aan de tent		
<b>Onderstel:handbediening</b> Controleren of de handbediening netjes is opgehangen aan de daarvoor bestemde ring		
<b>Opbouwframe:schroeven</b> Controleren of alle 12 schroeven goed vast gedraaid zijn		
<b>Opbouwframe:stootrubbers</b> Controleren of deze aanwezig zijn (4x) en goed vast zitten		
<b>Schuim</b> Controleren of alle schuimrollen luchtdicht geseald en zonder gaten/beschadigingen zijn		
<b>Sleutel van de handbediening</b> Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt		
<b>Onderstel:accu</b> Controleren of de accu ook zonder voeding werkt		
<b>Opname bij Human Protection Services</b> Contactpersoon : Diego	<b>Datum : 06-01-2026</b>    Diego	