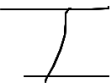


CHECKLIST FEELSAFE PRO TENT BT015-00586	Schoon?	Goed-Gekeurd?
FrameSchuimdelen Controleren of de openingen van de schuimdelen om het frame niet naar binnen zijn gedraaid		
TentBarcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is		
Tentgrijze doek (nylon) Binnen- en buitenkant en bedbodem controleren op beschadiging, vlekken en vieze geurtjes		
Tentgaas Binnen- en buitenkant van alle gaasdelen goed controleren op gaatjes, vooral aan de randen Driehoek: controleer op rafels		
Tentritsen en runners Goed controleren op defecten, met name de runners. Controleer belegjes achter de rits. Alle ritsen en clips sluiten.		
Tentinfuus ritsen Goed controleren op defecten, met name de runners. Let op dat de runner aan de binnenkant van de tent niet zichtbaar is		
Tentklittenband Klittenband op panelen (4x) mag geen pluisjes en draden bevatten.		
Tentkliksluitingen Controleren op aanwezigheid (4x) en defecten. Alle kliksluitingen sluiten.		
Tentcoating binnenkant + compartiment Controleer de binnenkant van de tent of de coating loslaat.		
Opdekmatras Controleren op vlekken, bobbelen en vieze geurtjes		
Comfortmatras Controleren op vlekken en vieze geurtjes Controleer of het comfortmatras juist in het compartiment ligt met het beleg naar beneden.		
Self open set Self open set Het binnenkoord van de self open set is NIET bevestigd aan de dubbele runner		
Self open set Self open set Het binnenkoord van de self open set is WEL aanwezig in het zakje van de gebruiksaanwijzing.		
Gebruiks-aanwijzing Controleren op aanwezigheid + versie: - Gebruikershandleiding NL 2.15 (of hoger) - Gebruikershandleiding GER 2.02 (of hoger) - Gebruikershandleiding FRA 2.03 (of hoger)		
Waarschuwings-kaartjes Controleren op aanwezigheid + leesbaarheid van 4 waarschuwingskaartjes. Indien niet aanwezig en/of leesbaar deze plaatsen.		
Ophangsnoer Controleren op aanwezigheid, Controleren op defecten aan ophangsnoer		

Onderstel Controleren op vlekken en vieze geurtjes Controleer of het comfortmatras juist in het compartiment ligt met het beleg naar beneden. Controleer het onderstel op beschadigingen etc. Is het onderstel toonbaar om in te zetten?			
Human Protection B.V. Droogdijkeneiland 4 026 SR Nederland		+31 (0)13 536 38 07 info@humanprotection.nl www.humanprotection.nl	
Opname bij Human Protection Services Contactpersoon : Diego		Datum : 07-01-2026  Diego	