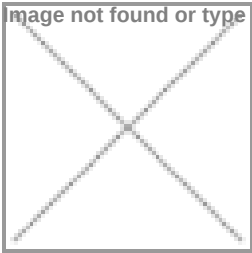


| CHECKLIST POSEY TENT 10000464                                                                                                                                                                       |  | Schoon?                                                                                                                                                                                 | Goed-Gekeurd? |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tent: Barcode</b><br>Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Tent: groen doek (nylon)</b><br>Binnen- en buitenkant en bedbodem controleren op beschadiging, vlekken en vieze geurtjes. Losse draden en rafels indien aanwezig afknippen.                      |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Tent: gaas</b><br>Binnen- en buitenkant van alle gaasdelen goed controleren op gaatjes, vooral aan de randen                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Tent: ritsen en runners</b><br>Goed controleren op defecten, met name de runners. Alle ritsen sluiten, ook achter klittenband                                                                    |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Tent: tie-wraps blokritsen</b><br>Controleren of de runners van de blokritsen deugdelijk aan elkaar zijn bevestigd met een tie-wrap (4 stuks per tent). Zo niet, alsnog aanbrengen of vervangen! |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Tent: klittenband</b><br>Klittenbanden mogen geen pluïsjes en draden bevatten. Klittenbanden zijn aanwezig op dak (4x), op afdekkapjes hoeken (4x) en rondom de twee zijpanelen                  |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Tent: kliksluitingen</b><br>Controleren op aanwezigheid (8x) en defecten. Alle kliksluitingen sluiten.                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Tent: algemeen</b><br>Controleer groene tentdoek en gele onderdelen op verkleuring in vergelijking met originele kleur. Indien verkleuring duidelijk aanwezig is, contact opnemen met HP.        |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Tent: binnenhoeken</b><br>Controleer de binnenhoeken op gaten.                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Opdekmatras</b><br>Controleren op vlekken, bobbelen en vieze geurtjes                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Comfortmatras</b><br>Controleren op vlekken en vieze geurtjes                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Controle plaatsing tent op onderstel</b><br>Controleren juiste plaatsing tent op onderstel: hoofdeind tent aan hoofdeind onderstel. Zie label op tent en sticker op onderstel                    |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Gebruiksaanwijzingen</b><br>Controleren op aanwezigheid + versie:<br>-Gebruikershandleiding 3.05<br>-Beknopte nalooplijst                                                                        |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Waarschuingskaartjes</b><br>Controleren op aanwezigheid + leesbaarheid van 4 waarschuingskaartjes. Indien niet aanwezig en/of leesbaar deze plaatsen.                                            |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Tentlabels</b><br>Controleren op aanwezigheid + leesbaarheid van tentlabels. Indien niet aanwezig en/of leesbaar tent naar atelier Human Protection.                                             |  |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Opname bij Human Protection Services</b><br>Contactpersoon : bart                                                                                                                                |  | <b>Datum : 09-01-2026</b><br><div style="text-align: center;"> <br/>           bart         </div> |               |