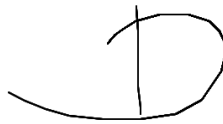


CHECKLIST VLOERBED 220 CM AC002.220-00004		Schoon?	Goed-Gekeurd?
Vloerbed: barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is			
Vloerbed: algemeen Controle op beschadigingen (frame, hoofd- en voetbord, motoren, bekabeling) en controleren dat er geen (keurings)stickers van derden aangebracht zijn op het bed			
Vloerbed: wielen Controleren op functionaliteit			
Vloerbed: remmen Controleren op functionaliteit (4x)			
Vloerbed: bedverstelling Controle functioneren hoofd- en voeteneindverstelling en hoog/laag/extralaag, Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling			
Vloerbed: Borgpen motoren Controle of borgpennen motoren goed vast zitten.			
Vloerbed: snoer Controleren of het snoer is voorzien van trekontlasting en of het onbeschadigd is.			
Sleutel van de handbediening Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt.			
Vloerbed: Bedhekken Controleren op aanwezigheid (2x), schade, en op functionaliteit van de verstelbaarheid			
Kop- en voetschot Controleer of het bed inclusief kop- en voetschot schoon zijn.			
Insealen (niet in combi Go) Het gehele bed is rondom ingeseald en voorzien van een reinigingskaartje.			
Bed papegaai (niet in combi Go) Controleren op aanwezigheid handvat en controleren of de papegaai niet ouder is dan 6 jaar. Productie datum is te vinden in het handvat			
Handleiding Handleiding vloerbed hangt in een sealbag d.m.v. een tyrip aan het vloerbed			
Opname bij Human Protection Services Contactpersoon : Diego		Datum : 12-01-2026  Diego	