

CHECKLIST FEELSAFE PRO TENT BT015-00762	Schoon?	Goed-Gekeurd?
<b>FrameSchuimdelen</b> Controleren of de openingen van de schuimdelen om het frame niet naar binnen zijn gedraaid		
<b>TentBarcode</b> Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is		
<b>Tentgrijze doek (nylon)</b> Binnen- en buitenkant en bedbodem controleren op beschadiging, vlekken en vieze geurtjes		
<b>Tentgaas</b> Binnen- en buitenkant van alle gaasdelen goed controleren op gaatjes, vooral aan de randen Driehoek: controleer op rafels		
<b>Tentritsen en runners</b> Goed controleren op defecten, met name de runners. Controleer belegjes achter de rits. Alle ritsen en clips sluiten.		
<b>Tentinfuus ritsen</b> Goed controleren op defecten, met name de runners. Let op dat de runner aan de binnenkant van de tent niet zichtbaar is		
<b>Tentklittenband</b> Klittenband op panelen (4x) mag geen pluisjes en draden bevatten.		
<b>Tentkliksluitingen</b> Controleren op aanwezigheid (4x) en defecten. Alle kliksluitingen sluiten.		
<b>Tentcoating binnenkant + compartiment</b> Controleer de binnenkant van de tent of de coating loslaat.		
<b>Opdekmatras</b> Controleren op vlekken, bobbelen en vieze geurtjes		
<b>Comfortmatras</b> Controleren op vlekken en vieze geurtjes Controleer of het comfortmatras juist in het compartiment ligt met het beleg naar beneden.		
<b>Self open set</b> Self open set Het binnenkoord van de self open set is NIET bevestigd aan de dubbele runner		
<b>Self open set</b> Self open set Het binnenkoord van de self open set is WEL aanwezig in het zakje van de gebruiksaanwijzing.		
<b>Gebruiks-aanwijzing</b> Controleren op aanwezigheid + versie: - Gebruikershandleiding NL 2.15 (of hoger) - Gebruikershandleiding GER 2.02 (of hoger) - Gebruikershandleiding FRA 2.03 (of hoger)		
<b>Waarschuwings-kaartjes</b> Controleren op aanwezigheid + leesbaarheid van 4 waarschuwingskaartjes. Indien niet aanwezig en/of leesbaar deze plaatsen.		
<b>Ophangsnoer</b> Controleren op aanwezigheid, Controleren op defecten aan ophangsnoer		

**Onderstel**

Controleren op vlekken en vieze geurtjes Controleer of het comfortmatras juist in het compartiment ligt met het beleg naar beneden. Controleer het onderstel op beschadigingen etc. Is het onderstel toonbaar om in te zetten?

Human Protection B.V.

Droogdijkeneiland 4

026 SR  
Nederland


+31 (0)15 536 38 07

info@humanprotection.nl  
www.humanprotection.nl

**Opname bij Human Protection Services**

**Datum : 13-01-2026**

Contactpersoon : Diego

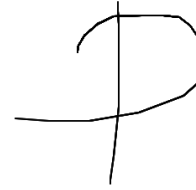

Diego