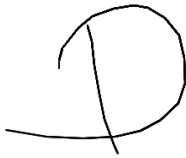


| CHECKLIST FEELSAFE PRO ONDERSTEL PB526IIPR-00127                                                                                                                          |  | Schoon?                                                                                                                             | Goed-Gekeurd? |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Onderstel: Barcode</b><br>Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is                                                                   |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Onderstel: HP fabrikantlabel</b><br>Controleren of het HP fabrikantlabel reeds is aangebracht! Zo niet, alsnog doen!                                                   |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Onderstel:Algemeen</b><br>Controle op beschadigingen en controleren dat er geen (keurings)stickers van derden aangebracht zijn op het onderstel                        |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Onderstel:Wielen</b><br>Controleren op functionaliteit en aanwezigheid schroefjes                                                                                      |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Onderstel:Remmen</b><br>Controleren op functionaliteit                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Onderstel:Bedverstelling</b><br>Controle functioneren hoofd- en voeteneindverstelling en hoog/laag verstelling                                                         |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Bij PB526I(PR): Borgpen motor voeteneind</b><br>Controle borgpen ligvlakmotor voeteneind, indien QR-clip aanwezig, deze vervangen door alternatieve borgpen (zie foto) |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Onderstel:kabel HL motor</b><br>Controleren dat de kabel van de hoog/laag motor minimaal 5cm van de grond hangt                                                        |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Onderstel:Bekabeling</b><br>Controleren dat de bekabeling geen beschadigingen bevat.                                                                                   |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Onderstel:CPR-functie</b><br>Controleren of deze naar behoren werkt (hoofdeinde omlaag bij inknippen hendel)                                                           |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Onderstel: Netsnoer</b><br>Controleren of het netsnoer is voorzien van trekontlasting en of het is vastgemaakt aan het klittenband aan de tent                         |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Onderstel:handbediening</b><br>Controleren of de handbediening netjes is opgehangen aan de daarvoor bestemde ring                                                      |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Opbouwframe:schroeven</b><br>Controleren of alle 12 schroeven goed vast gedraaid zijn                                                                                  |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Opbouwframe:stootrubbers</b><br>Controleren of deze aanwezig zijn (4x) en goed vast zitten                                                                             |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Schuim</b><br>Controleren of alle schuimrollen luchtdicht geseald en zonder gaten/beschadigingen zijn                                                                  |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Sleutel van de handbediening</b><br>Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt                                                |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Onderstel:accu</b><br>Controleren of de accu ook zonder voeding werkt                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |               |
| <b>Opname bij Human Protection Services</b><br>Contactpersoon : Diego                                                                                                     |  | <b>Datum : 14-01-2026</b><br><br><br><br>Diego |               |