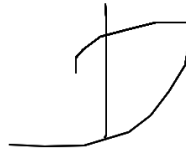


| CHECKLIST PROXIMA VLOERBED AC007-00095                                                                                                                                                         | Schoon? | Goed-Gekeurd? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| <b>Proxima barcode</b><br>Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is                                                                                           |         |               |
| <b>ProximaLabels</b><br>Controleren of de volgende labels aanwezig zijn, stevig vast zitten en goed leesbaar zijn:<br>- Fabrikantenlabel;<br>- CE markering;<br>- Importeurslabel              |         |               |
| <b>ProximaAlgemeen</b><br>Controle op beschadigingen (frame, hoofd- en voetbord, motoren, bekabeling) en controleren dat er geen (keurings)stickers van derden aangebracht zijn op het bed     |         |               |
| <b>ProximaAlgemeen</b><br>Controleren of alle bevestigingen en fittingen goed en stevig vast zitten                                                                                            |         |               |
| <b>ProximaBedframe</b><br>Controleren of het bedframe stabiel is                                                                                                                               |         |               |
| <b>ProximaWielen&amp;Remmen</b><br>Controleren op functionaliteit (4x)                                                                                                                         |         |               |
| <b>ProximaBorpenmotoren</b><br>Controle of borgpennen motoren goed vast zitten.                                                                                                                |         |               |
| <b>ProximaElektische Kabels</b><br>Controleren of alle elektrische kabels vastgemaakt                                                                                                          |         |               |
| <b>ProximaAccu</b><br>Controle op aanwezigheid en functionaliteit (verplicht bij verhuur, optioneel bij verkoop)                                                                               |         |               |
| <b>Handbediening</b><br>Controleren of de vergrendelingsfunctie van de handbediening correct op beide handbedieningen werkt                                                                    |         |               |
| <b>ProximaBedhekken</b><br>Controleer of de uitgeklapte bedhekken voldoende speling hebben t.o.v. het hoofdbord                                                                                |         |               |
| <b>Kop- en Voetschot</b><br>Controleren op aanwezigheid (2x), schade, stevigheid en functionaliteit                                                                                            |         |               |
| <b>Kop- en Voetschot</b><br>Check of het kop- en voetschot voorzien zijn van witte afdekdopjes                                                                                                 |         |               |
| <b>Insealen</b><br>Het gehele bed is rondom ingeseald en voorzien van een reinigingskaartje.                                                                                                   |         |               |
| <b>Handleiding</b><br>De volgende handleidingen zijn aanwezig in de juiste taal en de juiste versie:<br>- Proxima Gebruiksaanwijzing;<br>- Proxima Opklapbare Zijheksen Gebruiksaanwijzing.    |         |               |
| <b>Blauwe hoes</b><br>Controleer of er een blauwe hoes om het Proxima vloerbed zit.                                                                                                            |         |               |
| <b>FUNCTIONALITEIT : STAP 1</b><br>Verhoog het bed tot volledige hoogte door op knop 9 te drukken en vervolgens knop 2 ingedrukt te houden                                                     |         |               |
| <b>FUNCTIONALITEIT : STAP 2</b><br>Controleer of het voeteneinde-frame vergrendeld is en de hendels (4x) in de vergrendelpositie staan zoals op de afbeelding aan het einde van deze checklist |         |               |
| <b>FUNCTIONALITEIT : STAP 3</b><br>Laat het bed zakken tot op vloerniveau door op knop 9 te drukken, en vervolgens knop 3 ingedrukt te houden                                                  |         |               |
| <b>FUNCTIONALITEIT : STAP 4</b><br>Controleer alle snoeren op beknellingsgevaar                                                                                                                |         |               |

| CHECKLIST JAARLIJKSE KEURING PROXIMA VLOERBED AC007-00095                                                                                                                                                                                                                                        |  | Schoon?                                                                                                                         | Goed-Gekeurd? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>FUNCTIONALITEIT : STAP 5</b><br>De rugleuning omhoog en omlaag brengen, druk op knop 4 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt om de rugleuning omhoog te brengen. Druk op knop 4 en houd vervolgens knop 3 ingedrukt om de rugleuning te laten zakken                                            |  |                                                                                                                                 |               |
| <b>FUNCTIONALITEIT : STAP 6</b><br>De beensteun omhoog en omlaag brengen, druk op knop 5 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt om de beensteun omhoog te brengen. Druk op knop 5 en houd vervolgens knop 3 ingedrukt om de beensteun te laten zakken                                               |  |                                                                                                                                 |               |
| <b>FUNCTIONALITEIT : STAP 7</b><br>De Omgekeerde Trendelenburg-functie controleren (hoofd omhoog, voeten omlaag), druk op knop 8 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt                                                                                                                             |  |                                                                                                                                 |               |
| <b>FUNCTIONALITEIT : STAP 8</b><br>De Trendelenburg-functie controleren (hoofd omlaag, voeten omhoog), druk op knop 8 en houd vervolgens knop 3 ingedrukt                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                 |               |
| <b>FUNCTIONALITEIT : STAP 9</b><br>De Omgekeerde Trendelenburg-functie controleren (hoofd omhoog, voeten omlaag), druk op knop 8 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt                                                                                                                             |  |                                                                                                                                 |               |
| <b>FUNCTIONALITEIT : STAP 10</b><br>De stoelpositiefunctie controleren, druk op knop 6 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                 |               |
| <b>FUNCTIONALITEIT : STAP 11</b><br>De reanimatiefunctie controleren, plaats het bed in de stoelpositie, druk op knop 6 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt. Zodra het bed in de stoelpositie staat, drukt u op knop 11 om de reanimatiefunctie te starten                                       |  |                                                                                                                                 |               |
| <b>FUNCTIONALITEIT : STAP 12</b><br>Controleer de werking van de reanimatiehendels. Verhoog het bed tot volledige hoogte door op knop 9 te drukken en vervolgens knop 2 ingedrukt te houden. Breng de rugleuning omlaag door op knop 4 te drukken en vervolgens knop 2 ingedrukt te houden. Zorg |  |                                                                                                                                 |               |
| <b>FUNCTIONALITEIT : STAP 13</b><br>Schakel het remsysteem aan beide uiteinden van het bed in. Duw zachtjes tegen het bed aan elk uiteinde om er zeker van te zijn dat de remmen werken.                                                                                                         |  |                                                                                                                                 |               |
| <b>Opname bij Human Protection Services</b><br>Contactpersoon : Diego                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Datum : 22-01-2026</b><br><br><br>Diego |               |