


CHECKLIST FEELSAFE BASIC BEDBAK BB002-00071	Schoon?	Goed-Gekeurd?
OnderstelBarcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is		
Onderstel:HP Fabrikantenlabel Controleren of het HP fabrikantlabel reeds is aangebracht! Zo niet, alsnog doen!		
OnderstelAlgemeen Controle op beschadigingen en controleren dat er geen (keurings)stickers van derden aangebracht zijn op het onderstel of de bedbak		
Onderstel:wielen Controleren op functionaliteit		
Onderstel:remmen Controleren of het bed in de vaste stand staat.		
Onderstel:pootrubbers(alleen bij PB531) Controleren of de rubbers aan de onderkant van de poten onbeschadigd en goed bevestigd zijn (pootrubbers alleen aanwezig bij PB531).		
Onderstel:bedverstelling Controle functioneren hoog/laag verstelling		
Onderstel:bekabeling Controleren dat de bekabeling geen beschadigingen bevat.		
Onderstel:snoer Controleren of het snoer is voorzien van trekontlasting en of het is vastgemaakt aan het klittenband aan de tent.		
Onderstel:handbediening Controleren of de handbediening netjes is opgehangen aan de daarvoor bestemde ring		
Opbouwframe:schroeven Controleren of alle 8 schroeven goed vast gedraaid zijn		
Schuim Controleren of alle schuimrollen luchtdicht geseald en zonder gaten en/of beschadigingen zijn		
Borging frameaan poot Controleren of de bouten aan de buitenkant van de poot aanwezig zijn en goed zijn aangedraaid.		
Sleutel van dehandbediening Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt.		
Opname bij Human Protection Services Contactpersoon : Diego	Datum : 22-01-2026  Diego	