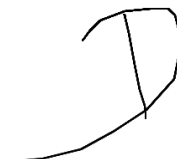


CHECKLIST FEELSAFE PRO ONDERSTEL PB526IIPR-01023		Schoon?	Goed-Gekeurd?
Onderstel: Barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is			
Onderstel: HP fabrikantlabel Controleren of het HP fabrikantlabel reeds is aangebracht! Zo niet, alsnog doen!			
Onderstel:Algemeen Controle op beschadigingen en controleren dat er geen (keurings)stickers van derden aangebracht zijn op het onderstel			
Onderstel:Wielen Controleren op functionaliteit en aanwezigheid schroefjes			
Onderstel:Remmen Controleren op functionaliteit			
Onderstel:Bedverstelling Controle functioneren hoofd- en voeteneindverstelling en hoog/laag verstelling			
Bij PB526I(PR): Borgpen motor voeteneind Controle borgpen ligvlakmotor voeteneind, indien QR-clip aanwezig, deze vervangen door alternatieve borgpen (zie foto)			
Onderstel:kabel HL motor Controleren dat de kabel van de hoog/laag motor minimaal 5cm van de grond hangt			
Onderstel:Bekabeling Controleren dat de bekabeling geen beschadigingen bevat.			
Onderstel:CPR-functie Controleren of deze naar behoren werkt (hoofdeinde omlaag bij inknippen hendel)			
Onderstel: Netsnoer Controleren of het netsnoer is voorzien van trekontlasting en of het is vastgemaakt aan het klittenband aan de tent			
Onderstel:handbediening Controleren of de handbediening netjes is opgehangen aan de daarvoor bestemde ring			
Opbouwframe:schroeven Controleren of alle 12 schroeven goed vast gedraaid zijn			
Opbouwframe:stootrubbers Controleren of deze aanwezig zijn (4x) en goed vast zitten			
Schuim Controleren of alle schuimrollen luchtdicht geseald en zonder gaten/beschadigingen zijn			
Sleutel van de handbediening Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt			
Onderstel:accu Controleren of de accu ook zonder voeding werkt			
Opname bij Human Protection Services Contactpersoon : bt015-00631		Datum : 23-01-2026  bt015-00631	