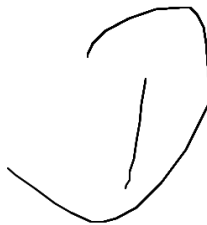


CHECKLIST FEELSAFE GO EA003-00129	Schoon?	Goed-Gekeurd?
Vloerbed: barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is.		
Vloerbed: algemeen Controle op beschadigingen (frame, hoofd- en voetbord, motoren, bekabeling) en controleren dat er geen (keurings)stickers van derden aangebracht zijn op het bed.		
Vloerbed: Wielen Controleren op functionaliteit.		
Vloerbed: Remmen Controleren op functionaliteit (4x).		
Vloerbed: bedverstelling Controle functioneren hoofd- en voeteneindverstelling en hoog/laag/extralaag, Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling.		
Vloerbed: Borgpen motoren Controle of borgpennen motoren goed vast zitten.		
Vloerbed: snoer Controleren of het snoer is voorzien van trekontlasting en of het onbeschadigd is.		
Sleutel van de handbediening Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt.		
Vloerbed: Bedhekken Controleren op aanwezigheid (2x), schade, en op functionaliteit van de verstelbaarheid		
Kop- en voetschot Controleer of het bed inclusief kop- en voetschot schoon zijn.		
Handleiding Handleiding vloerbed hangt in een zakje aan het voeteneind.		
Comfortmatras Controleer of er een comfortmatras aanwezig is.		
Bescherming Controleer of de hoofd- en voeteneind bescherming aanwezig is. Bijgeleverde sloten verwijderen.		
Tent: Barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is. De barcode zit rechts achter.		
Tent: Gaas Binnen- en buitenkant van alle gaasdelen goed controleren op gaatjes/losse stukjes, vooral aan de randen.		
Frame: 6x bevestigingsbandbed Controleer of er 6 stroken aan het frame van de tent en aan het bed zijn vastgemaakt en goed vastzitten.		
Beschermer Controleer aanwezigheid schuim, stiksel e.d.		
Tent: algemeen Controleer alle onderdelen op verkleuring in vergelijking met originele kleur. Indien verkleuring duidelijk aanwezig is, contact opnemen met Human Protection.		
Frame: aluminium kokers Is het frame goed opgebouwd op het vloerbed en zijn alle onderdelen aanwezig en niet beschadigd. 1150x25x25mm – 4 stuks 927x25x25mm – 8 stuks 840x25x25mm – 4 stuks 8 hoeken 4 rechte koppelstukken 2 rechte en 4 hoeken bevatten een zwart		
Frame: Schuimprofielen Controleren of de juiste aantallen aanwezig zijn en of ze schoon en onbeschadigd zijn: 4x 115cm U-vorm blauw (om 927mm kokers) 1x 182cm L-vorm geel (in beschermer)		

CHECKLIST JAARLIJKSE KEURING FEELSAFE GO EA003-00129		Schoon?	Goed-Gekeurd?
Opname bij Human Protection Services Contactpersoon : Diego		Datum : 29-01-2026  Diego	