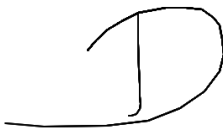


CHECKLIST FEELSAFE TRANSFER BEDBAK BB003-00023		Schoon?	Goed-Gekeurd?
OnderstelBarcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is			
Onderstel:HP Fabrikantenlabel Controleren of het HP fabrikantlabel reeds is aangebracht! Zo niet, alsnog doen!			
OnderstelAlgemeen Controle op beschadigingen en controleren dat er geen (keurings)stickers van derden aangebracht zijn op het onderstel of de bedbak			
Onderstel:wielen Controleren op functionaliteit			
Onderstel:remmen Controleren of het bed in de vaste stand staat.			
Onderstel:pootrubbers(alleen bij PB531) Controleren of de rubbers aan de onderkant van de poten onbeschadigd en goed bevestigd zijn (pootrubbers alleen aanwezig bij PB531).			
Onderstel:bedverstelling Controle functioneren hoog/laag verstelling			
Onderstel:bekabeling Controleren dat de bekabeling geen beschadigingen bevat.			
Onderstel:snoer Controleren of het snoer is voorzien van trekontlasting en of het is vastgemaakt aan het klittenband aan de tent.			
Onderstel:handbediening Controleren of de handbediening netjes is opgehangen aan de daarvoor bestemde ring			
Opbouwframe:schroeven Controleren of alle 8 schroeven goed vast gedraaid zijn			
Borging grameaan poot Controleren of de bouten aan de buitenkant van de poot aanwezig zijn en goed zijn aangedraaid.			
Schuim Controleren of alle schuimrollen luchtdicht geseald en zonder gaten en/of beschadigingen zijn			
Sleutel van dehandbediening Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt.			
Opname bij Human Protection Services Contactpersoon : Diego		Datum : 30-01-2026  Diego	