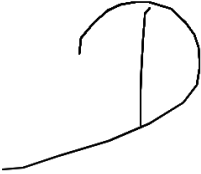


CHECKLIST PROXIMA VLOERBED AC007-00096	Schoon?	Goed-Gekeurd?
Proxima barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is		
ProximaLabels Controleren of de volgende labels aanwezig zijn, stevig vast zitten en goed leesbaar zijn: - Fabrikantenlabel; - CE markering; - Importeurslabel		
ProximaAlgemeen Controle op beschadigingen (frame, hoofd- en voetbord, motoren, bekabeling) en controleren dat er geen (keurings)stickers van derden aangebracht zijn op het bed		
ProximaAlgemeen Controleren of alle bevestigingen en fittingen goed en stevig vast zitten		
ProximaBedframe Controleren of het bedframe stabiel is		
ProximaWielen&Remmen Controleren op functionaliteit (4x)		
ProximaBorpenmotoren Controle of borgpennen motoren goed vast zitten.		
ProximaElektrische Kabels Controleren of alle elektrische kabels vastgemaakt		
ProximaAccu Controle op aanwezigheid en functionaliteit (verplicht bij verhuur, optioneel bij verkoop)		
Handbediening Controleren of de vergrendelingsfunctie van de handbediening correct op beide handbedieningen werkt		
ProximaBedhekken Controleer of de uitgeklapte bedhekken voldoende speling hebben t.o.v. het hoofdbord		
Kop- en Voetschot Controleren op aanwezigheid (2x), schade, stevigheid en functionaliteit		
Kop- en Voetschot Check of het kop- en voetschot voorzien zijn van witte afdekdopjes		
Insealen Het gehele bed is rondom ingeseald en voorzien van een reinigingskaartje.		
Handleiding De volgende handleidingen zijn aanwezig in de juiste taal en de juiste versie: - Proxima Gebruiksaanwijzing; - Proxima Opklapbare Zijhekken Gebruiksaanwijzing.		
Blauwe hoes Controleer of er een blauwe hoes om het Proxima vloerbed zit.		
FUNCTIONALITEIT : STAP 1 Verhoog het bed tot volledige hoogte door op knop 9 te drukken en vervolgens knop 2 ingedrukt te houden		
FUNCTIONALITEIT : STAP 2 Controleer of het voeteneinde-frame vergrendeld is en de hendels (4x) in de vergrendelpositie staan zoals op de afbeelding aan het einde van deze checklist		
FUNCTIONALITEIT : STAP 3 Laat het bed zakken tot op vloerniveau door op knop 9 te drukken, en vervolgens knop 3 ingedrukt te houden		
FUNCTIONALITEIT : STAP 4 Controleer alle snoeren op beknellingsgevaar		

CHECKLIST JAARLIJKSE KEURING PROXIMA VLOERBED AC007-00096	Schoon?	Goed-Gekeurd?
FUNCTIONALITEIT : STAP 5 De rugleuning omhoog en omlaag brengen, druk op knop 4 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt om de rugleuning omhoog te brengen. Druk op knop 4 en houd vervolgens knop 3 ingedrukt om de rugleuning te laten zakken		
FUNCTIONALITEIT : STAP 6 De beensteun omhoog en omlaag brengen, druk op knop 5 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt om de beensteun omhoog te brengen. Druk op knop 5 en houd vervolgens knop 3 ingedrukt om de beensteun te laten zakken		
FUNCTIONALITEIT : STAP 7 De Omgekeerde Trendelenburg-functie controleren (hoofd omhoog, voeten omlaag), druk op knop 8 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt		
FUNCTIONALITEIT : STAP 8 De Trendelenburg-functie controleren (hoofd omlaag, voeten omhoog), druk op knop 8 en houd vervolgens knop 3 ingedrukt		
FUNCTIONALITEIT : STAP 9 De Omgekeerde Trendelenburg-functie controleren (hoofd omhoog, voeten omlaag), druk op knop 8 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt		
FUNCTIONALITEIT : STAP 10 De stoelpositiefunctie controleren, druk op knop 6 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt		
FUNCTIONALITEIT : STAP 11 De reanimatiefunctie controleren, plaats het bed in de stoelpositie, druk op knop 6 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt. Zodra het bed in de stoelpositie staat, drukt u op knop 11 om de reanimatiefunctie te starten		
FUNCTIONALITEIT : STAP 12 Controleer de werking van de reanimatiehendels. Verhoog het bed tot volledige hoogte door op knop 9 te drukken en vervolgens knop 2 ingedrukt te houden. Breng de rugleuning omlaag door op knop 4 te drukken en vervolgens knop 2 ingedrukt te houden. Zorg		
FUNCTIONALITEIT : STAP 13 Schakel het remsysteem aan beide uiteinden van het bed in. Duw zachtjes tegen het bed aan elk uiteinde om er zeker van te zijn dat de remmen werken.		
Opname bij Human Protection Services Contactpersoon : Diego	Datum : 03-02-2026  Diego	