

| CHECKLIST FEELSAFE GO EA003-00110                                                                                                                                                                                                                                                               | Schoon? | Goed-Gekeurd? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| <b>Vloerbed: barcode</b><br>Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is.                                                                                                                                                                                         |         |               |
| <b>Vloerbed: algemeen</b><br>Controle op beschadigingen (frame, hoofd- en voetbord, motoren, bekabeling) en controleren dat er geen (keurings)stickers van derden aangebracht zijn op het bed.                                                                                                  |         |               |
| <b>Vloerbed: Wielen</b><br>Controleren op functionaliteit.                                                                                                                                                                                                                                      |         |               |
| <b>Vloerbed: Remmen</b><br>Controleren op functionaliteit (4x).                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |
| <b>Vloerbed: bedverstelling</b><br>Controle functioneren hoofd- en voeteneindverstelling en hoog/laag/extralaag, Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling.                                                                                                                               |         |               |
| <b>Vloerbed: Borgpen motoren</b><br>Controle of borgpennen motoren goed vast zitten.                                                                                                                                                                                                            |         |               |
| <b>Vloerbed: snoer</b><br>Controleren of het snoer is voorzien van trekontlasting en of het onbeschadigd is.                                                                                                                                                                                    |         |               |
| <b>Sleutel van de handbediening</b><br>Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt.                                                                                                                                                                     |         |               |
| <b>Vloerbed: Bedhekken</b><br>Controleren op aanwezigheid (2x), schade, en op functionaliteit van de verstelbaarheid                                                                                                                                                                            |         |               |
| <b>Kop- en voetschot</b><br>Controleer of het bed inclusief kop- en voetschot schoon zijn.                                                                                                                                                                                                      |         |               |
| <b>Handleiding</b><br>Handleiding vloerbed hangt in een zakje aan het voeteneind.                                                                                                                                                                                                               |         |               |
| <b>Comfortmatras</b><br>Controleer of er een comfortmatras aanwezig is.                                                                                                                                                                                                                         |         |               |
| <b>Bescherming</b><br>Controleer of de hoofd- en voeteneind bescherming aanwezig is. Bijgeleverde sloten verwijderen.                                                                                                                                                                           |         |               |
| <b>Tent: Barcode</b><br>Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is. De barcode zit rechts achter.                                                                                                                                                               |         |               |
| <b>Tent: Gaas</b><br>Binnen- en buitenkant van alle gaasdelen goed controleren op gaatjes/losse stukjes, vooral aan de randen.                                                                                                                                                                  |         |               |
| <b>Frame: 6x bevestigingsbandbed</b><br>Controleer of er 6 stroken aan het frame van de tent en aan het bed zijn vastgemaakt en goed vastzitten.                                                                                                                                                |         |               |
| <b>Beschermer</b><br>Controleer aanwezigheid schuim, stiksel e.d.                                                                                                                                                                                                                               |         |               |
| <b>Tent: algemeen</b><br>Controleer alle onderdelen op verkleuring in vergelijking met originele kleur. Indien verkleuring duidelijk aanwezig is, contact opnemen met Human Protection.                                                                                                         |         |               |
| <b>Frame: aluminium kokers</b><br>Is het frame goed opgebouwd op het vloerbed en zijn alle onderdelen aanwezig en niet beschadigd.<br>1150x25x25mm – 4 stuks<br>927x25x25mm – 8 stuks<br>840x25x25mm – 4 stuks<br>8 hoeken<br>4 rechte koppelstukken<br>2 rechte en 4 hoeken bevatten een zwart |         |               |
| <b>Frame: Schuimprofielen</b><br>Controleren of de juiste aantallen aanwezig zijn en of ze schoon en onbeschadigd zijn:<br>4x 115cm U-vorm blauw (om 927mm kokers)<br>1x 182cm L-vorm geel (in beschermer)                                                                                      |         |               |

| CHECKLIST JAARLIJKSE KEURING FEELSAFE GO EA003-00110                  |  | Schoon?                                                                                                            | Goed-<br>Gekeurd? |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Opname bij Human Protection Services</b><br>Contactpersoon : Diego |  | Datum : 06-02-2026<br><br>Diego |                   |