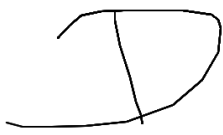


CHECKLIST VLOERBED AC002-00534		Schoon?	Goed-Gekeurd?
<b>Vloerbed: barcode</b> Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is			
<b>Vloerbed: algemeen</b> Controle op beschadigingen (frame, hoofd- en voetbord, motoren, bekabeling) en controleren dat er geen (keurings)stickers van derden aangebracht zijn op het bed			
<b>Vloerbed: wielen</b> Controleren op functionaliteit			
<b>Vloerbed: remmen</b> Controleren op functionaliteit (4x)			
<b>Vloerbed: bedverstelling</b> Controle functioneren hoofd- en voeteneindverstelling en hoog/laag/extralaag, Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling			
<b>Vloerbed: Borgpen motoren</b> Controle of borgpennen motoren goed vast zitten.			
<b>Vloerbed: snoer</b> Controleren of het snoer is voorzien van trekontlasting en of het onbeschadigd is.			
<b>Sleutel van de handbediening</b> Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt.			
<b>Vloerbed: Bedhekken</b> Controleren op aanwezigheid (2x), schade, en op functionaliteit van de verstelbaarheid			
<b>Kop- en voetschot</b> Controleer of het bed inclusief kop- en voetschot schoon zijn.			
<b>Insealen (niet in combi Go)</b> Het gehele bed is rondom ingeseald en voorzien van een reinigingskaartje.			
<b>Bed papegaai (niet in combi Go)</b> Controleren op aanwezigheid handvat en controleren of de papegaai niet ouder is dan 6 jaar. Productie datum is te vinden in het handvat			
<b>Handleiding</b> Handleiding vloerbed hangt in een sealbag d.m.v. een tyrip aan het vloerbed			
<b>Opname bij Human Protection Services</b> Contactpersoon : Diego		<b>Datum : 06-02-2026</b>	
			
		Diego	